

Interferon- γ Test (Tuberkulose)

Patientenetikett

Name	
Vorname	
Geburtsdatum	
Krankenhaus	
Station	Aufnahmedatum
Aufnahmenummer	☐ männlich ☐ weiblich
☐ Wissenschaft ☐ Personal	☐ stationär ☐ ambulant

Stations-Etikett

☐ Kasse ☐ Privat



**UNIKLINIK
KÖLN**

Institut für Medizinische
Mikrobiologie, Immunologie
und Hygiene

Goldenfelsstraße 19-21, 50935 Köln
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. J. Jantsch

<https://immih.uk-koeln.de>

DAkkS-Akkreditierungsstelle
Registrierungsnummer: D-ML-13253-03-00

Tel. 0221/478-32100, Fax 478-32134
Probenannahme
werktags 730-1930 Sa./So. 900-1300
Diensthabender Arzt
Tel. 478-32223, Funk 2343
Notfälle außerhalb der Dienstzeiten
Tel. 0171/5 777 555

Bitte Punkte **1. - 2.** ausfüllen, um eine möglichst schnelle Bearbeitung zu gewährleisten

1. Indikation

- ☐ Klinischer Verdacht auf Tuberkulose
- ☐ Umgebungsuntersuchung nach Kontakt mit TB-Patienten
- ☐ Screening vor/bei immunsuppressiver Therapie (Transplantation, TNF- α Blocker etc.)
- ☐ Andere Indikation _____

2. Einsender

Beh. Arzt/Ärztin
(Druckbuchstaben) _____

Tel. Station _____ Tel. Arztzi. _____

Funk _____ Datum _____

Unterschrift _____

Für interne Zwecke (Labor)

ACHTUNG: Bitte unbedingt Abnahmezeit angeben!





Abnahmezeitpunkt (Datum / Uhrzeit): _____

Untersuchungsmaterial

- ☐ Peripheres Blut in QuantiFERON-Plus „Single Patient Pack“-Röhrchen (bestellbar über Apotheke)

Hinweise

- Verwenden Sie ausschließlich die speziellen **QFT®-Plus Blutentnahmeröhrchen**: Nil, TB1, TB2, Mitogen.
Röhrchen per Hand beschriften, **NICHT** mit Patientenetikett überkleben!
- Befüllen Sie jedes der 4 Röhrchen mit ca. **1 ml** Blut.
Den zulässigen Bereich von 0,8-1,2ml (**schwarze Markierung**) nicht überschreiten, sonst ist der Test nicht auswertbar!
Bei Verwendung von Butterfly-Nadeln: Füllen Sie mittels Leerröhrchen die Schlauchverbindung bevor Sie die QFT®-Plus-Röhrchen aufsetzen.
- Schwenken** Sie die Röhrchen **10-mal** bis die gesamte Innenwand der Röhrchen mit Blut benetzt ist.
- Röhrchen **schnellstmöglich** ins Institut für Medizinische Mikrobiologie (IMMIH) schicken (max. Transportzeit 16 Stunden).
Lagerung der Röhrchen bis zum Eintreffen im IMMIH bei **Raumtemperatur** (17-27°C). Röhrchen **NICHT** vorinkubieren!
- Auf jeden Fall den **Zeitpunkt der Abnahme** auf diesem Schein dokumentieren!

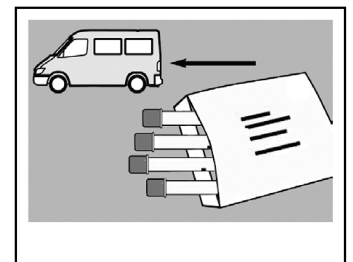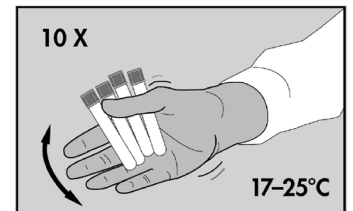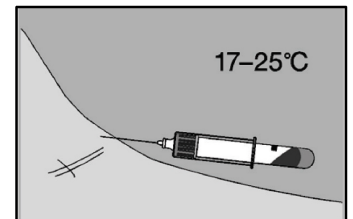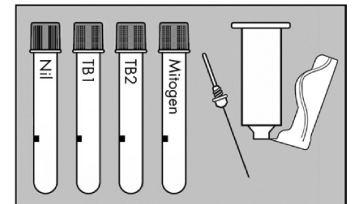

Ausführliche Informationen zum Interferon- γ Test entnehmen Sie bitte dem Infoblatt „Diagnostik der latenten Mycobacterium tuberculosis-Infektion durch Interferon- γ Tests“:
<https://immih.uk-koeln.de/dienstleistungen/anforderungsboegen>.